


 Manufacturer: Suretex
Limited 31/1 Moo 4,
Suratthani - Thakuapha
Road, Tambon Khao Hua
Kwai, Amphur Phunphin,
Suratthani 84130, Thailand

 Importer: LifeStyles
Europe SAS, 21-23 Rue
du Petit Albi, CS 78395,
95805 Cergy Pointoise
Cedex, France

 EC REPRESENTATIVE:
SXWell Belgium,
Riverside Business Park,
Internationalelaan 55,
B-1070 BRUSSELS

 Distributor: MAPA GmbH,
Industriestraße 21-25,
27404 Zeven, Germany,
www.billy-boy.de

BILLY BOY®

Artikel-Nr. 11.520.153

Rev. 11 (2020-10)



CE2797

MD Medizinprodukt (EU) No. 2017/745

SKYNN® und FEEL EVERYTHING® sind eingetragene Marken der
LifeStyles Healthcare Pte Ltd.

WICHTIGE HINWEISE

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegel-
briefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf sollte
das Kondom nicht mehr verwendet werden! Kondome kühl,
trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
geschützt lagern. Kondome greifen nicht in den Organismus
ein und erzeugen keine Nebenwirkungen.

BILLY BOY SKYNN Kondome sind aus Polyisopren hergestellt.
BILLY BOY SKYNN Kondome sind frei von Naturkautschuklatex
und geeignet für Menschen mit einer bekannten oder vermutlichen
Latexallergie. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie
das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.
Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Bei richtiger
Anwendung schützen BILLY BOY-Kondome vor Schwangerschaft
und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel
kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder
Infektionskrankheiten garantieren. Falls das Kondom während
des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellst-
möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf. Bitte
melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das
Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen
Behörde.



Hautnah. Alles spüren.

GEBRAUCHSHINWEISE

BILLY BOY – FÜR JEDEN DAS PASSENDE PRODUKT:

Ihr zwei. Haut an Haut. Ganz nah. Was gibt es schöneres?
Mit BILLY BOY SKYNN Hautnah spürt ihr euch noch intensiver!
Und macht eure gemeinsamen Momente mit Sicherheit zu
einem gefühlsintensiven Erlebnis. Das innovative latexfreie
Material Polyisopren ist besonders anschnittsam und lässt
euch das einmalige Hautnah-Gefühl erleben.

BILLY BOY SKYNN Hautnah – ein ultrasinnlicher Genuss.

Egal wann, wie oder wo: Liebt euch – so wie ihr es wollt. Mit
dem vielfältigen Sortiment aus Kondomen, Gleitgelen sowie
Toys bietet BILLY BOY alles was anmacht.



1. AUFREISSEN



Die Siegelfolie vorsichtig an einer der Zacken öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden!

2. VORSPIEL



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut komplett zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt ➔

VORSICHT

Bei manchen hochempfindlichen Personen können Inhaltsstoffe dieser Kondome allergische Reaktionen auslösen. Tritt eine Reizung oder ein Brennen auf, stellen Sie den Gebrauch dieses Kondoms ein und suchen Sie einen Arzt auf. Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z. B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette) verwenden. Diese greifen das BILLY BOY SKYN Kondom aus Polyisopren an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern. Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige ➔

sich das Kondom nicht leicht abrollen ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

3. NACHSPIEL



Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dafür das Kondom am Penisansatz fest, so verhindern Sie ein Abrutschen des Kondoms.

4. ENTSORGUNG

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebesspiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und / oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom verwenden.

PERSÖNLICHE UND ANONYME TELEFONBERATUNG ZUM THEMA SAFER SEX UND VERHÜTUNG ETC.:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

- Täglich ab 10 Uhr unter 01805/555444 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, maximal 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz)
- telefonberatung@bzga.de oder www.aidsberatung.de